

Aggiornamento di cubestress con HD+

Contenuto della confezione

1) CD installazione + memory stick USB



2) Acquisitore HD+ e cavo paziente



3) N° 2 pile AAA



4) Elettrodo monouso stress a bottone




5) Marsupio HD+



Nota: questa guida applica a tutte le versioni di cubestress.



1 – Rimozione del cubestress precedente

- Accendere il computer, fare una **copia di backup** della cartella del database pazienti (C:\Cardioline\Cardioline\Database) su un disco esterno;
- Aprire il Pannello di Controllo del PC nella sezione per disinstallare un programma;
- Selezionare «Cardioline Cube» e cliccare con il tasto destro del mouse, scegliere «Disinstalla»;

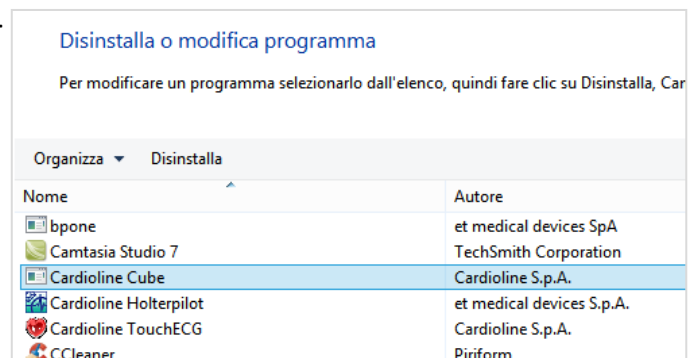


2 – Installazione del nuovo programma

- Inserire il CD di installazione o la chiave di memoria USB (1) fornita a corredo;
- Aprire la cartella «Setup»;
- Avviare il programma «Cube_setup.exe»;
- Quando il programma chiede di accettare i termini di licenza selezionare l'opzione «Accetto...»;
- Quando il programma rileva il database esistente scegliere di **NON sovrascriverlo**;
- Seguire la procedura guidata di installazione fino a completamento.

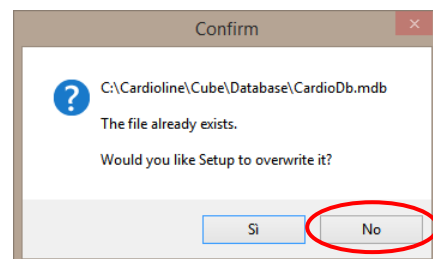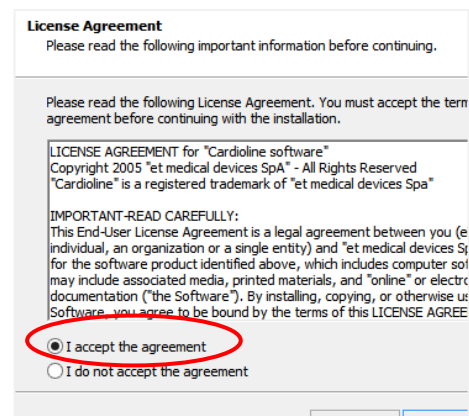


3 – Preparazione del dispositivo HD+


- Aprire lo sportello delle batterie del HD+ ed inserire 2 batterie (A);
- Inserire il cavo paziente nell'apposita presa (B);
- Accendere il HD+ premendo sul tasto di accensione (C);

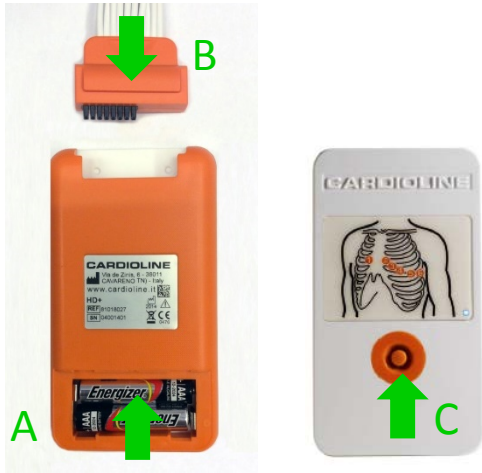

- Sul PC cliccare sull'icona Bluetooth e scegliere «**Aggiungi un dispositivo Bluetooth**». Normalmente l'icona si trova nella barra di Windows o nel pannello di controllo;

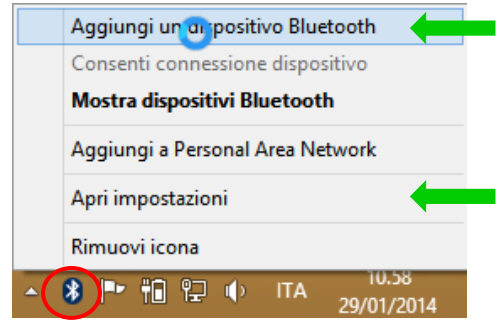

- Attendere che Windows completi l'installazione, poi cliccare nuovamente sull'icona Bluetooth di Windows e scegliere «**Apri impostazioni**»;
- selezionare la finestra «Porte COM» e prendere nota della **porta COM in uscita**;

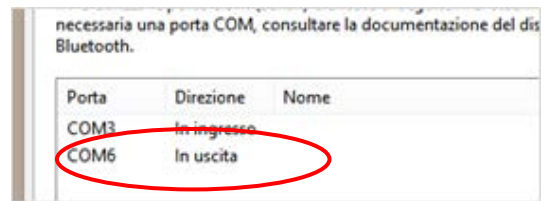

4 – Impostazione del software

- Aprire il programma Cube utilizzando l'icona che si trova sul desktop del computer, inserire MED1 come nome utente e password;
- Aprire un esame stress test e selezionare il menu «**Funzione>Setup**»;
- Aprire il pannello «**Comunicazione**»;
- Selezionare la **porta seriale** in uscita ottenuta durante la procedura di accoppiamento al punto (3) e come **Tipo** di dispositivo «**clickecgBT_2500**»;
- Premere il tasto «**OK**» e riavviare il programma.

